

Ny 3-kammerposer fra B. Braun

Sekvensiell utblanding
Mykt materiale gir enkel håndtering

1 FORBEREDELSE



Fjern ytteremballasjen – bruk rive-merker på begge sider.¹




Ta trekammerposen ut av ytteremballasjen.¹



Kast ytteremballasjen, oksygenindikatoren og oksygenabsorbereren.¹

! Sikkerhet

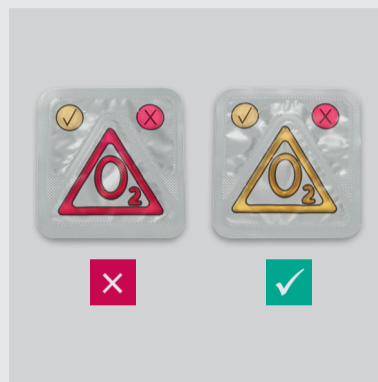

Sikkerhet – kontroller indikator
Trekammerposen skal ikke brukes hvis oksygenindikatoren er rosa/rød.
Trekammerposen skal *kun* brukes når oksygenindikatoren er gul.¹

2 UTBLANDING



Sekvensiell utblanding, trekammerposen skal rulles med begge hender, og start med å åpne forseglingen som skiller det øvre kammeret (glukose) og det nedre kammeret (aminyrer).¹ Bland godt.



! Tilsetninger



Steril tilsetningsport (hvit).
Fjern aluminiumsbeskyttelsen for å tilsette kompatible tilsetninger gjennom tilsetningsporten.¹

Sikkerhet



Sikkerhet.
Etter å ha tilsatt klare tilsetningsstoffer til den klare løsningen, er en visuell kontroll er mulig.

2 ... UTBLANDING



Fortsett med å presse slik at forseglingen rundt det midterste kammeret (fettemulsjon) og det nederste kammeret åpner seg. Bland innholdet i trekammerposen grundig.



3 FORBEREDELSE FØR INFUSJON



Steril infusjonsport (grønn)
Fjern aluminiumsfolien fra infusjonsporten og koble infusjonssettet til. Bruk et infusjonssett uten lufting eller hold lufteventilen i infusjonssett med lufting. Heng opp trekammerposen, og behandle infusjonen etter vanlig prosedyre.¹

DINE FORDELER

- Oksygenindikator gir økt sikkerhet
- Sterile membraner i begge porter
- Stabile, selvluukkende porter er enkle å håndtere
- Fargekode gjør det enkelt å differensiere portene

Bemerk: Kun engangsbruk
Beholder og eventuelt restvolum må kastes etter bruk. Frakoblede trekammerposer skal ikke kobles til pasienten igjen.
Hvis infusjonsfilter skal brukes, må disse være lipid permeable (porestørrelse $\geq 1,3 \mu\text{m}$).