


EASYPUMP® II


I SJEKKLISTE FOR FYLLING AV PUMPEN OG SLANGEN

Merk: Bruk aseptisk teknikk


Elastomeriske pumper kan fylles med en LuerLock sprøyte eller lignende utstyr under aseptisk teknikk.

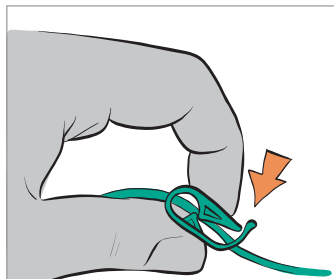


1. Steng slangeklemmen.

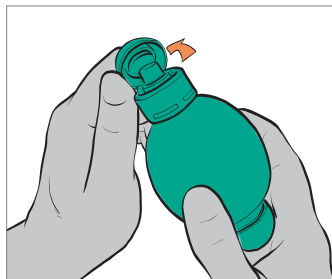


2. Åpne beskyttelseshetten.

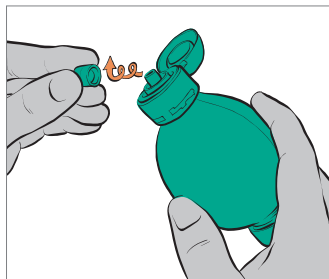


3. Fjern lukkeproppen fra fylleporten og plasser den på en steril overflate.

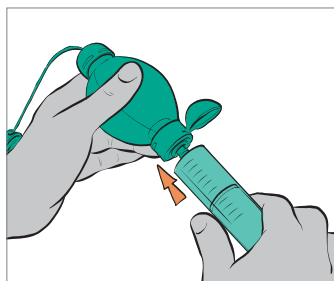


4. Koble sprøyten/fylleanordningen til fylleporten.

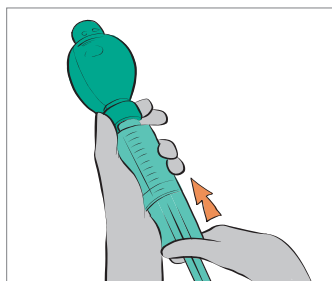


5. Fyll Easypump II med omtrent 10 ml av væsken, gjerne bare NaCl 9 mg/ml.

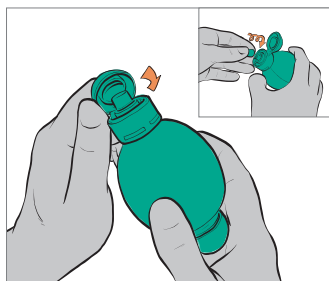


6. Fjern sprøyten/fylleanordningen fra pumpen, sett på lukkepropp og lukk beskyttelseshetten.

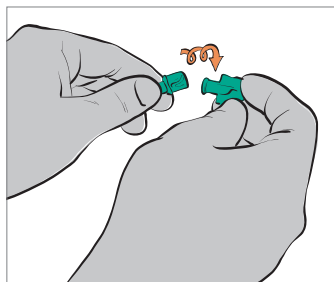


7. Fjern lukkeporten på tilkoblingsporten.

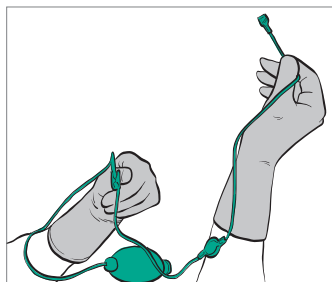

8. Under fylling/priming skal filteret holdes oppover (som pasienttilkoblingen). Filteret må fuktes for å sikre gode forhold og funksjonalitet.

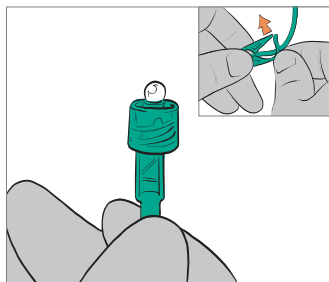

9. Åpne lukkeklemmen. Fyll settet til en dråpe kommer til syne på den distale enden av infusjonsslangen. Kontroller at all luft er fjernet fra slangen.

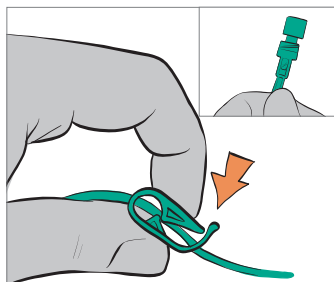

10. Steng lukkeklemmen og sett på lukkepropp på infusjonsslangen.

GJØR LIVET ENKLERE –
EASYPUMP® II

