



EASYPUMP® II


SJEKKLISTE FOR TILKOBLING - Hvordan kobler man til pumpen?

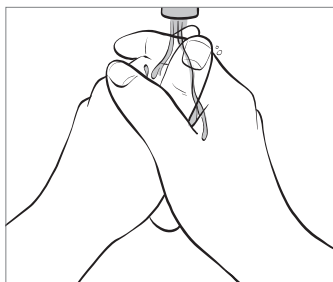


1. Vask og desinfiser hendene dine grundig.

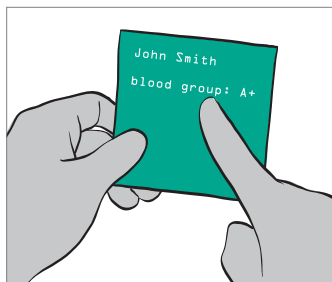


2. Kontroller følgende informasjon på etiketten på pumpen: pasientdata, medikament og holdbarhetsdato.

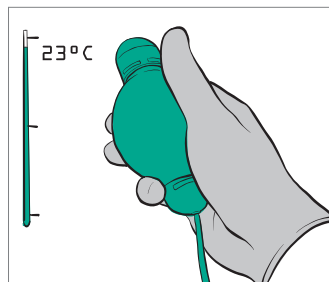


3. Forsikre deg om at pumpen har oppnådd romtemperatur.

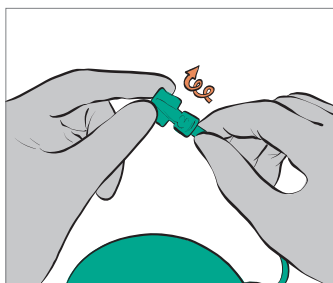


4. Fjern beskyttelseshetten fra tilkoblingen på infusjons-slangen.

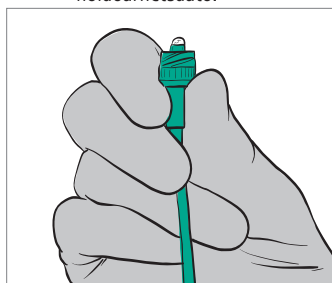


5. Hele pumpesystemet må fylles med væske før infusjons-slangen kobles til pasienten.

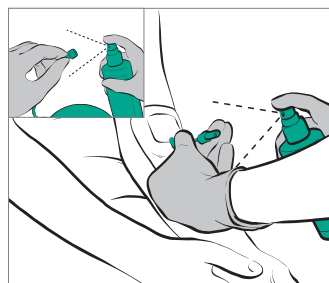


6. Desinfiser tilkoblingsporten. Husk virketiden.

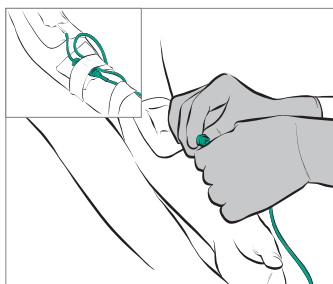


7. Koble pumpen til venetil-gangen din.

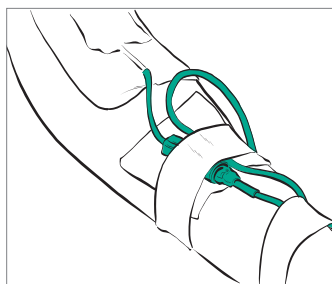

8. Sikre at hastighetsregulatoren er tapet til huden.

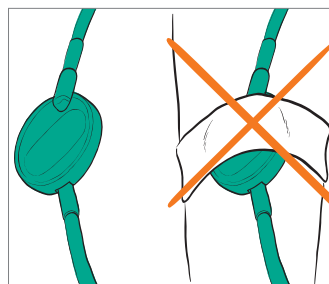

9. Sjekk at filteret er fritt, og ikke er dekket av bandasjer.

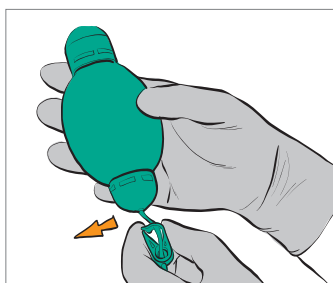

10. Åpne lukkeklemmen, og infusjonen starter automatisk.

GJØR LIVET ENKLERE –
EASYPUMP® II

