

Ecoflac® Connect + Skyllesett

Utblanding av medikament i et dokumentert lukket system, med etterskyll.

Et lukket system er et blandesystem for legemidler som mekanisk hindrer overgang av eventuell forurensing fra omgivelsene inn i system, og hindrer at farlig legemiddel eller aerosol slippes ut av systemet til tilstøtende miljø.¹

Ved bruk av Ecoflac Connect overføringsadapter vil ikke medikament fra hetteglasset kunne forurense miljøet der utblandingen gjøres.² Ecoflac® Connect er en effektiv barriere mot forurensing av utblandet legemiddel.³

Ecoflac® Connect er et viktig hjelpemiddel for å sikre at helsepersonell ikke eksponeres for legemiddel/aerosol ved utblanding, og at legemiddelet ikke forurennes av eventuelle urenheter i miljøet.





Finn frem:

- Ecoflac® plus beholder
- Ecoflac® Connect overføringsadapter - riktig størrelse
- Skyllesett, artikkel 4110000
- Legemiddel



- Fjern de to metallbeskyttelsene på Ecoflac® plus beholder og avdekk de sterile tilsetnings- og infusjonsområdene
- Koble Ecoflac® Connect til beholderen slik at den sitter godt festet
- Koble til medikament hetteglasset (skal desinfiseres)
- Monter infusjonssettet. Lufteventil og rulleklemme skal være stengt. Den hvite klemmen øverst ved spike beholdes åpen.



- Fyll halve dråpekammeret med nøytral løsning fra Ecoflac® plus beholderen. Fyll infusjonssettet.



- Hold deretter systemet vannrett, med medikamentglasset pekende svakt nedover.
- Press kraftig på beholderen slik at medikamentglasset fylles ca. kvart med væske.



- Rist – slik at medikamentet løses opp.
- Hold systemet med medikamentglasset øverst. Press på beholderen, og det oppløste medikamentet renner tilbake til beholderen.



- Heng opp Ecoflac® plus beholderen, koble infusjonssettet til pasienten og start infusjonen.



- Når infusjonen er avsluttet, steng hvit lukkeklemme over dråpekammer. Desinfiser den nålefrie membranen, koble til sprøyte (gjærne med luer lock kobling) fylt med minimum 10 ml NaCl 9 mg/ml.
- Press sprøytens innhold inn i dråpekammeret til skylling av settet.
- Når dråpekammeret er tørt, stenges rulleklemmen.
- Systemet kobles fra pasienten, og kastes samlet



Ecoflac® Connect sortiment:

Ecoflac® Connect	Tilpasset medikamentglass:	Artikkelnr:	VNR:
Liten	Diameter 13 mm	4090549	96 90 07
Medium	Diameter 20 mm	4090550	90 33 34
Stor	Diameter 32 mm	4090552	80 36 18
Skylesett	Intrafix® flush	4110000	

¹ NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health).

² Test Report Quality labs & GmbH, oppgave 1432

³ Expert report DMT 2014-038, Evaluation of the microbial barrier performance of the drug admixture system Ecoflac Connect against spores of *Bacillus subtilis* (ATCC 6633). (Internal microbial investigation no. 4.3 A)