



Duplex medikamentsystem er en klar-til-bruk, tokammer beholder. Medikamentet er lagret i et kammer og oppløsningsvæsken lagret i et annet kammer frem til medikamentet skal blandes og infunderes.

## DUPLEX<sup>®</sup> medikamentsystem

Bland på et øyeblikk

# Hva er DUPLEX® Medikamentsystem?

DUPLEX® er en fleksibel tokammerpose til intravenøs infusjon der det ublandede medikament og oppløsningsvæsken er lagret skilt fra hverandre frem til utblanding.




DUPLEX® medikamentsystem inneholder ikke PVC, DEHP eller latex.

Holdbarhet:	24 måneder
Ubrutt beholder	7 dager
Beskyttelsesfolie fjernet:	4 t i romtemperatur
Utblandet:	48 timer i kjøleskap (2 - 8°C)
Utblander:	Brukes umiddelbart

# DUPLEX® Medikamentsystem

## BRUKSANVISNING

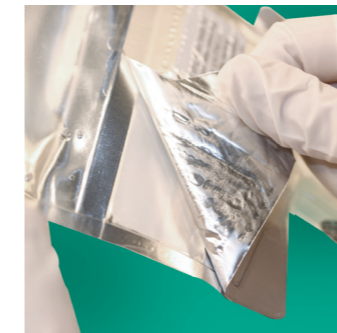

### FJERN

Fjern folie-beskyttelsen fra medikamentkammeret



### KLEM I

Brett posen delvis dobbelt og klem for å åpne forseglingen mellom oppløsningsvæsken og medikamentet



### RIST

Rist posen grundig slik at medikamentet blandes



### KLEM II

Brett posen helt dobbelt og klem for å åpne forsegling nummer to slik at væsken når frem til infusjonsporten



### INFUNDER

Fjern beskyttelsen fra infusjonsporten og koble til infusjonssettet

### MERKING OG KONTROLL

- Klistre tilsetningsslappen med pasientdata på foliesiden av beholderen.
- Åpne lukkemekanismen og fold ut DUPLEX® beholderen. Forseglingen må være intakt.
- Inspiser kammeret med oppløsningsvæsken ved å se etter partikler. Medikamentkammeret undersøkes for misfarging eller fremmedelementer. Beholderen må beskyttes for lys etter at aluminiumsbeskyttelsen er fjernet. NB! Produktet skal IKKE oppbevares i kjøleskap før aktivering. Fargeendringer påvirker ikke medikamentets egenskaper.

### TILBEREDNING:

- Fold ut DUPLEX beholderen og hold den med infusjonsporten ned.
- Start ved toppen av posen ved opphengningshullet og fold DUPLEX® beholderen dobbelt til rett under øvre forsegling og slik at all luft er over bretten. Klem på det brettede væskekammeret for å aktivere utblandingen. Forseglingen mellom de to kamrene åpnes og medikamentet blandes med oppløsningsvæsken.
- Rist DUPLEX® beholderen slik at medikamentet er fullstendig oppløst.
- Inspiser visuelt oppløsningen for partikler.

### ADMINISTRER:

- Hold beholderen med infusjonsporten ned
- Start ved toppen av posen ved opphengningshullet og fold DUPLEX® beholderen dobbelt til nedenfor væsken og slik at all luft er over bretten. Klem på den brettede DUPLEX® beholderen til forseglingen mellom væsken og infusjonsporten åpnes og væsken når frem til infusjonsporten.
- Bruk aseptisk teknikk, fjern beskyttelsen til infusjonsporten og koble til infusjonssettet. Vi henviser til lokal prosedyre.

### FORSIKTIGHETSREGLER:

- Skal kun brukes hvis løsningen er klar og fri for partikler.
- Tilsetninger skal ikke gjøres.
- Skal ikke fryses.
- Les pakningsvedlegget for fullstendig informasjon om bruk og forordning.

B. Børson & Sønner AS | Kjellerveien 12 B | 0842 Vestskogstien | Norge  
Tlf. 03 35 18 00 | [www.bbim.no](http://www.bbim.no) | E-post: [offisemal.bbim@bbim.com](mailto:offisemal.bbim@bbim.com)