


Space^{plus} Perfusor[®]

Hurtigguide



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

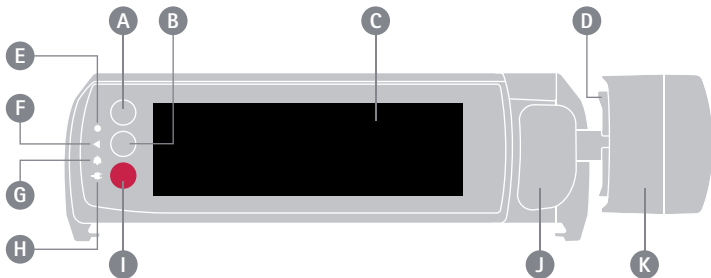

A Hjem-knapp

B På/Av-knapp

C Touch-skjerm

D Gripeklør

E Lyssensor

F LED for pågående infusjon

G LED for alarm

H LED for tilkoblet strøm


I STOPP-knapp

J Sprøyteholder


K Driverarm

Slå på pumpen


1. Trykk på På/Av-knappen

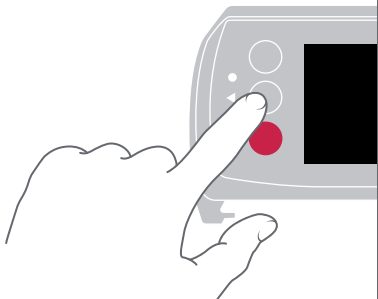


2. Symbolene skal lyse

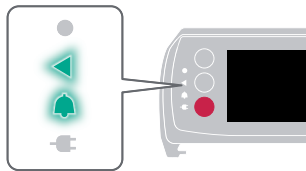


3. Skjermen slår seg på, og selvtest gjennomføres

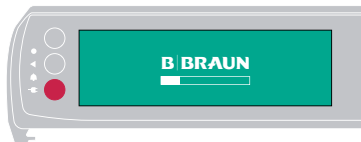


4. Klørne åpnes, og lukkes automatisk

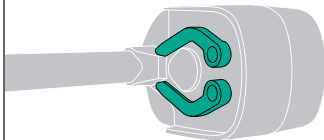

1. Åpne dekelet, dra sprøyteholder rett ut, og vri til høyre


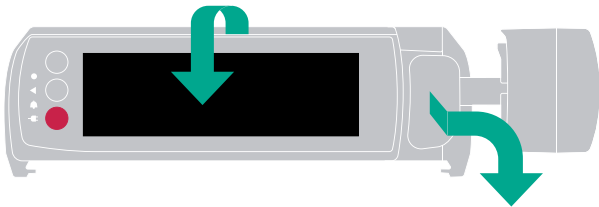


2. Sett inn sprøyten, og steng sprøyteholder

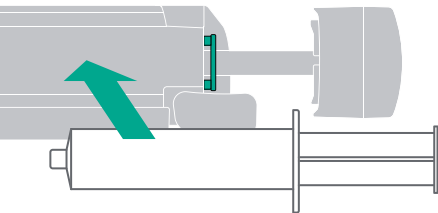

⚠ OBSERVER


Sprøytens vinger må plasseres mellom pumpehuset, og sprøyteklemmen

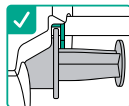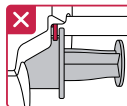

3. Steng dekelet, og følg instruksjoner på skjermen

Programmere en infusjon

1. Trykk på **Hjem**-knappen

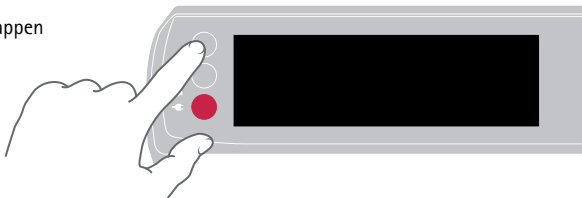


2. Trykk på **Ny Infusjon**




3. Følg instruksjonene på skjermen

⚠ OBSERVER

Bolus kan kun gis under pågående infusjon!

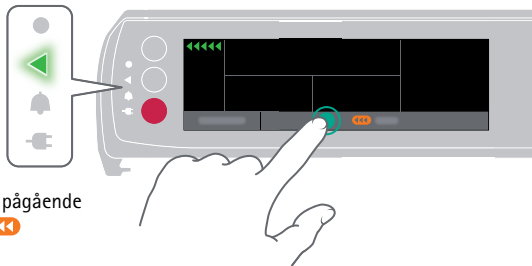

1. Bytt til skjermbilde for pågående infusjon og trykk på 
2. Velg bolus-type



Forprogrammert bolus

- Bolus gis etter at mengde og tid er angitt

Manuell bolus

- Bolus gis ved å trykke, og holde knappen inne




Sprøytebytte




1. Trykk på **Stop** for å stoppe infusjonen, og koble settet fra pasienten



2. Åpne dekselet, dra sprøyteholder rett ut og vri den mot høyre

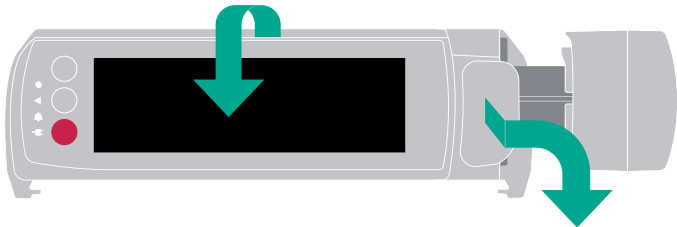

3. Bytt til ny sprøyte

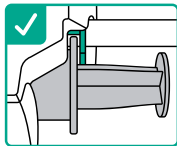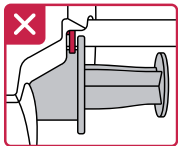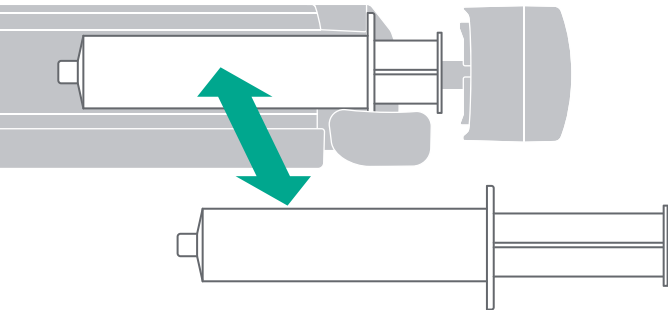

⚠ OBSERVER


Sprøytens vinger
må plasseres mellom
pumpedekselet og
sprøyteholder


4. Steng dekselet, og følg instruksjonene på skjermen

Pre-Alarm

OBSERVER

Infusjonen stopper ikke ved en Pre-Alarm

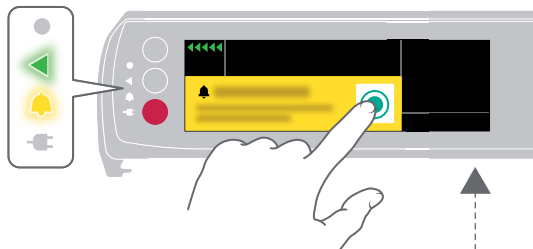


1. Slå av alarmen ved å trykke på 
2. Pre-Alarm vises fortsatt i sidefeltet




Pre-Alarmen repeteres automatisk

OBSERVER

Ved driftsalarm stopper infusjonen

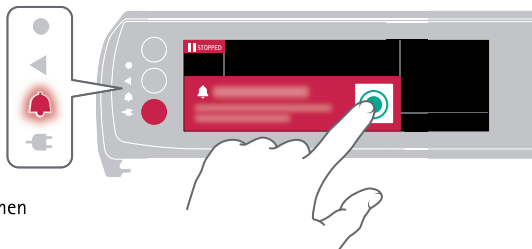

1. Slå av, og bekreft alarmen ved å trykke på 


2. Informasjon om driftsalarm vises fortsatt i sidefeltet




Finn, og løs problemet
► Og fortsett infusjonen

Endre mottrykksnivå


1. Trykk på **Hjem**-knappen

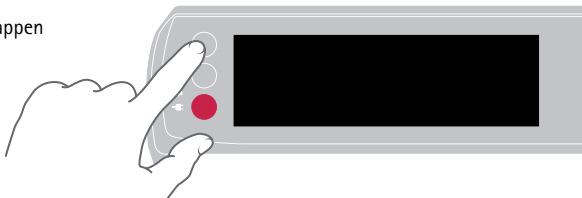


2. Velg **Mottrykksnivå**

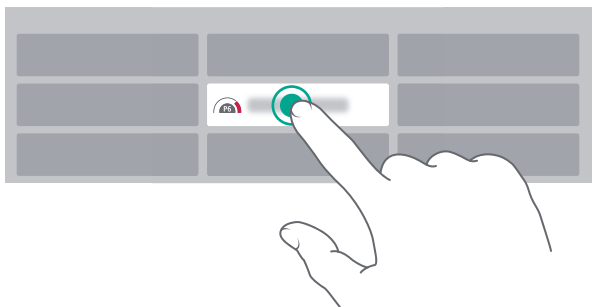

3. Mottrykksnivå-innstilling

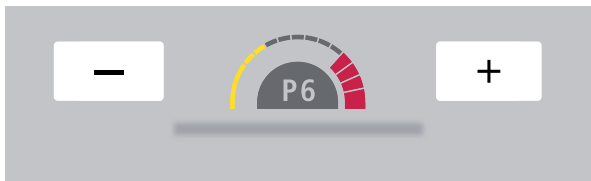

4. Innstilt mottrykknivå vises i skjermbildet (under infusjon)

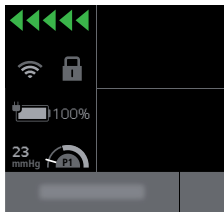


Den hvite manometerviseren viser mottrykket/ arbeidstrykket for pågående infusjon, og det grå feltet viser det innstilte mottrykksnivået. Når viseren når det grå feltet, trigges mottrykksalarmen. Et lavt innstilt trykknivå gir et større grått felt, og alarmen kommer raskere.

Slå av pumpen

Trykk, og hold inne
Av/På-knappen i mer enn

2 sekunder

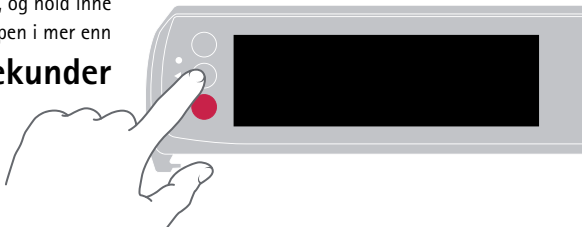

Med sprøyte i pumpen

► Pumpen går i Standby



Sprøyte tatt ut

► Pumpen slås av

GB Scan datamatrix and find the Instruction for Use via the article number 8719030

DE Scanne den QR-Code und finde die Gebrauchsanweisung unter der Artikelnummer 8719030

CZ Naskenujte QR kód a vyhledejte Návod k použití prostřednictvím katalogového čísla 8719030

DK Scan QR-koden og find instruktionsmanualen for artikelnummer 8719030

ES Escanee el código QR e introduzca la referencia 8719030 para localizar sus Instrucciones de Uso

FI Skanna QR-koodi ja etsi käyttöohje tuotenumeroista 8719030

FR Scannez le QR code et recherchez la notice d'utilisation via le code article 8719030

HU Olvassa be a QR-kódot, majd a használati utasítást a 8719030 cikkszámom találja meg

IT Scansiona il QR-code e accedi alle Istruzioni per l'Uso tramite il codice articolo 8719030

LT Nuskanuokite QR kodą ir rasite produkto, kurio ref. kodas yra 8719030 vartotojo instrukciją

LV Skenējiet QR kodu un atrodiēt lietošanas instrukciju, norādot artikula numuru 8719030

NL Scan QR-code en vind de gebruiksaanwijzing via artikelnummer 8719030

PL Zeskanuj QR-code i znajdź instrukcję obsługi pod numerem artykułu 8719030

PT Faça a leitura do código QR-code para aceder às instruções de utilização relativas ao código de artigo 8719030

RO Scanați codul QR pentru Instrucțiunile de utilizare ale articolului 8719030

RS Skenirajte QR-kod kako bi došli do Uputstva za korišćenje za artikal broj 8719030

SE Skanna streckoden och hitta bruksanvisningen via artikelnummer 8719030

SI Skenirajte QR-kodo in poiščite navodilo za uporabo preko številke izdelka 8719030

SK Naskenujte QR kód a vyhľadajte Návod na použitie prostredníctvom katalógového čísla 8719030

