


KIRURGISK SKYLLING

Ecobag® CE

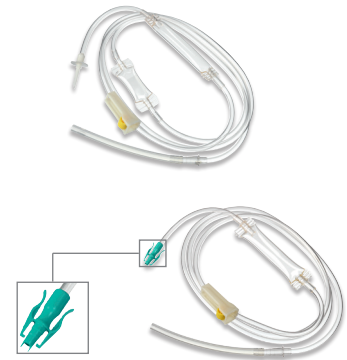

Ecobag®

Et bredt spekter av skyllevæsker leveres i Ecobag® beholder – i størrelsene 2, 3 og 5 liter – for å dekke brukernes behov til forskjellige kirurgiske inngrep.

De selvlukkende portene på Ecobag® beholder er sterile under beskyttelseshetten. Portsystemet er tilpasset skyllesett med spike-tilkobling.

Ecobag® beholder er fargekodet som gjør det enklere å skille mellom de forskjellige løsningene.

Ecobag® click

Den grønne tilkoblingen er utarbeidet slik at den enkelte kan kobles til skyllesettet Ecoclick® med ett klikk.


Settet roterer rundt sin egen akse slik at det ikke blir drag på posen.

Skyllesett – Ecospike og Ecoclick® familien

I kombinasjon med Ecobag® og Ecobag® click, tilbys forskjellige systemer for kirurgisk skylking – tradisjonell spike kobling, og click-kobling.

Begge systemer leveres som enkle og doble sett. I tillegg leveres spesielle versjoner til bruk ved artroskopi.

Ecobag® click – bruksanvisning

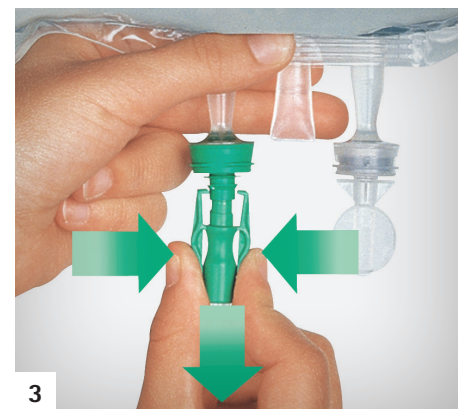

Beskyttelseshetten fra Ecobag® click fjernes ved å vri den rundt. Porten er steril, og det er ikke nødvendig å sterilisere den før tilkobling.

Koble skyllesettet til den grønne koblingen på Ecobag® click. En hørbar tilbakemelding gjør det mulig å gjenkjenne når settet er riktig tilkoblet.

Skyllesettet kobles fra skylleposen ved å legge et lite trykk på vingene til Ecoclick®. Både til- og frakobling er enkelt å utføre og medfører liten fysisk belastning for helsepersonell.