


# ECOBAG® CE SKYLLEPOSE

## BRUKSANVISNING FOR TILKOBLING AV SKYLLESETT:

- 1** Pakk ut skyllesettet, steng rulleklemmen(e), fjern beskyttelseshetten på spissen på skyllesettet og på skylleposen (grå port).
- 2** Før spissen på skyllesettet inn i senter av porten på skylleposen – til du kjenner en motstand.
- 3** Behold settet i samme posisjon, og roter spissen litt – til du kjenner at den perforerer membranen. Viktig: på dette punktet må du ikke føre spissen helt inn, dette for å sikre mot utstansing av partikler.
- 4** Når membranen er perforert, la spissen stå litt i posisjonen slik at membranen kan trekke seg tilbake.
- 5** Før nå spissen helt inn i Ecobag® skyllepose.
- 6** Før bruk, kontroller posen.

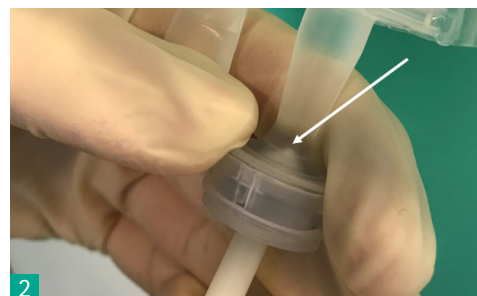

### Kontaktpersoner:

Christine Cavallar Hoel  
Distriktssjef HSØ  
E-post : [christine.hoel@bbraun.com](mailto:christine.hoel@bbraun.com)  
Tlf.: 400 02 070

Erlend Lie  
Distriktssjef Helse Midt og Nord  
E-post: [erlend.lie@bbraun.com](mailto:erlend.lie@bbraun.com)  
Tlf.: 928 34 591

Trudi Helland  
Distriktssjef Helse Vest og Sørlandet  
E-post: [trudi.helland@bbraun.com](mailto:trudi.helland@bbraun.com)  
Tlf.: 928 34 606