

Pleurofix[®]

Lukket sett for pleura punksjon



Sikkerhet i håndtering og hygiene

Pleurofix®

Pleurofix®

Ansamling av luft og / eller væske i pleurahulen kan føre til livstruende forstyrrelser i luftveiene og hjertefunksjonen.

Målet for akuttbehandlingen er derfor å garantere eliminering av luft eller væske. Dette gjøres ved hjelp av en enkelt nålpunksjon for fjerning av luft eller væske.

Dobbel tilbakeslagsventil (Pleurofix® Nr. 2)

Omnifix®-Lock

- 60 ml Omnifix® sprøyte Luer-Lock med liten friksjon

Bruksområde:

- Fjerning av sekret fra pleurahulen
- Pneumothorax
- Skylling av pleurahulen
- Medikamentinjeksjon

Slange med standard konet kobling (Pleurofix® nr. 2)


(Pleurofix® nr. 2) med Luer-Lock-adapter og treveiskran (Pleurofix® nr. 1 - ikke avbildet)

Tynnvegget punksjonskanyle

- Punksjon med kort og skarp fasettsliping

Sekretpose

- Gradert sekretoppsamlingspose med kapasitet på 2 liter

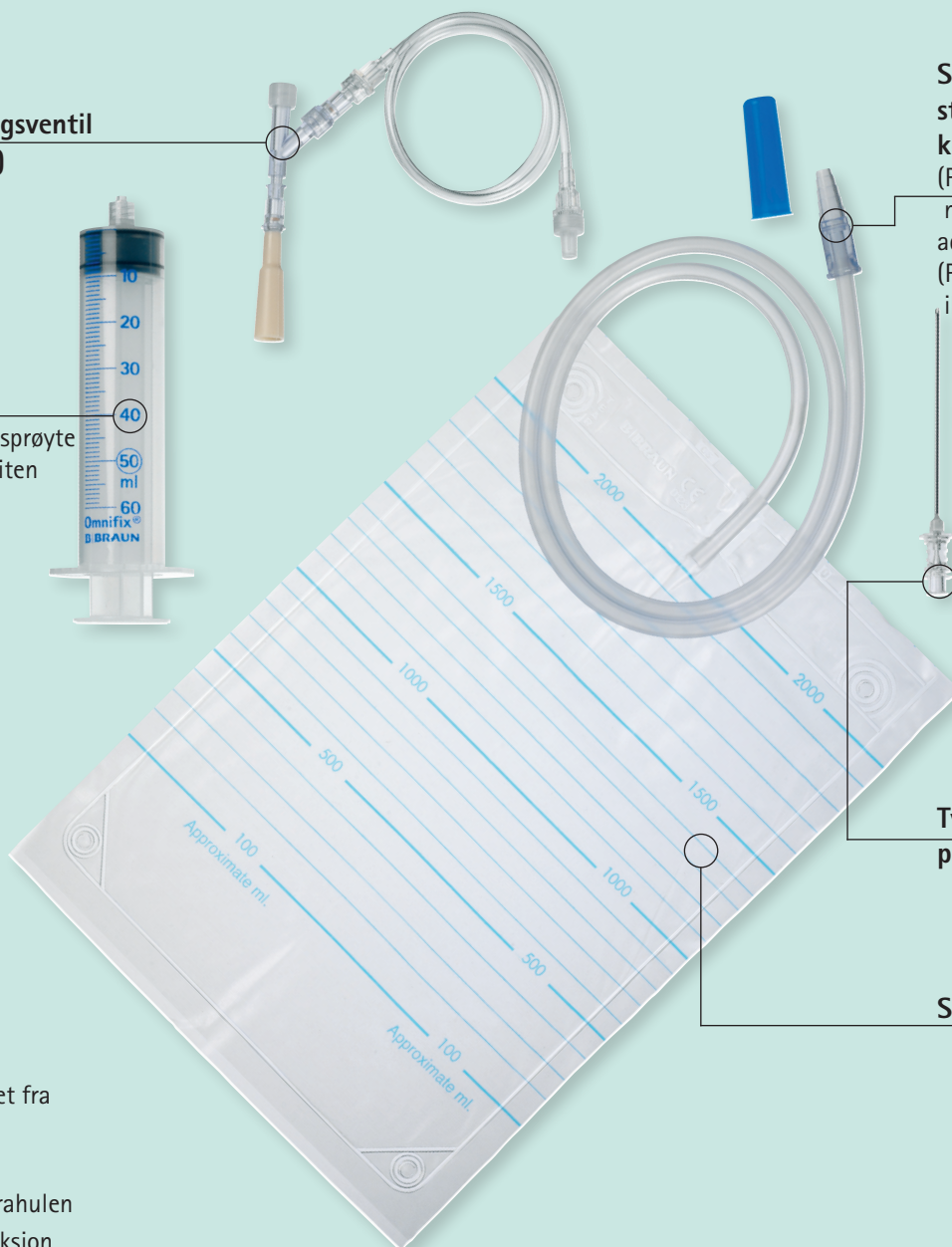

Brukerfordeler:


- Lukket system på grunn av luft- og væsketett Luer-lock kobling
- Rask drenasje av pleurahulen
- Atraumatisk punksjon
- Mulighet for medikamentinjeksjon

Anvendelse av Pleurofix®

Punksjonen må utføres under aseptiske forhold. Kanylen og sprøyte kobles til treveiskran eller forlengingsslangen. Tilgang til kanylen stenges ved tilsvarende innstilling på treveiskranen. Punksjonsnålen føres inn i pleurahulen, og sekret trekkes opp i sprøyten og overføres deretter til sekretposen.* Gjenværende sekret fjernes og kanylen trekkes ut.

* På Pleurofix® nr. 1 justeres treveiskranen, på Pleurofix® nr. 2 tar den doble tilbakeslagsventilen over funksjonen til treveiskranen. Justering er unødvendig.

Pleurofix® Nr. 1

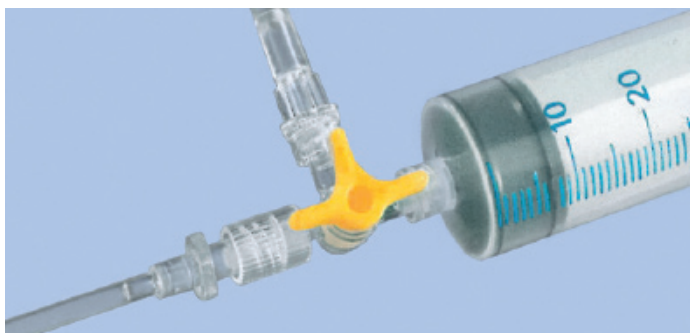

Treveiskran

- Enkel å bruke med retningsindikator
- Mulighet for medikamentinjeksjon

Pleurofix® Nr. 2



Dobbel tilbakeslagsventil

- Ingen tilbakestrømning av væske til pasienten
- Enkel aspirasjon av væske og rask overføring til sekretposen

Beskrivelse:	Art. nr:	Pakn. størrelse:
Pleurofix®, sett for Pleurapunksjon		
Tynnvegget punksjonskanyle med kort sliping 1,8 x 80 mm		
Overføringslange med Luer-Lock kobling		
Omnifix® Luer-Lock engangssprøyte 60 ml		
Sekretpose 2 liter		
Pleurofix® Nr. 1	4461002	25
med Discofix® treveiskran, gul		
Pleurofix® Nr. 2	4461037	25
med dobbel tilbakeslagsventil		

Beskrivelse:	Art. nr:	Pakn. størrelse:
Sekretpose som passer til Pleurofix® Nr. 1	4462009	100
Luer-Lock kobling (han)		
Slange 90 cm		
2 liter		
Pakket enkeltvis, sterile		
Sekretpose som passer til Pleurofix® Nr. 2	4423208	100
Standard konet kobling		
Slange 90 cm		
2 liter		
Pakket enkeltvis, sterile		

