

Discofix[®] C

Din unike tilgang til sikkerhet



Den sprekresistente treveiskranen

Vær kompromissløs


Sprekkdannelser i kraner – et problem som kan føre til alvorlige komplikasjoner

Kraner, en uunnværlig del av et infusjonssystem, spiller en nøkkelrolle innen infusjonsterapi.

Høykonsentrerte, effektive medikamenter er likeså en integrert del av avanserte behandlingsregimer.

Potente medikamenter, som for eksempel anestetika, cytostatika, antibiotika, i kombinasjon med hyppige håndteringer, kan forårsake så store spenninger i kraner at kritiske skader oppstår. Fettemulsjoner og desinfeksjonsrutiner kan også forårsake sprekkdannelser grunnet spenninger. Mulige konsekvenser

er lekkasje, kontaminering og, enda verre, risiko for luftemboli. Denne risikoen utsetter både helsepersonell og pasienter for fare, er en konstant kilde til usikkerhet, og krever kontinuerlig overvåking. Møt dette dilemmaet ved å kreve en kran som motstår virkningen av medikamenter og sprekkdannelser grunnet spenninger. Ikke gå på akkord med sikkerheten.

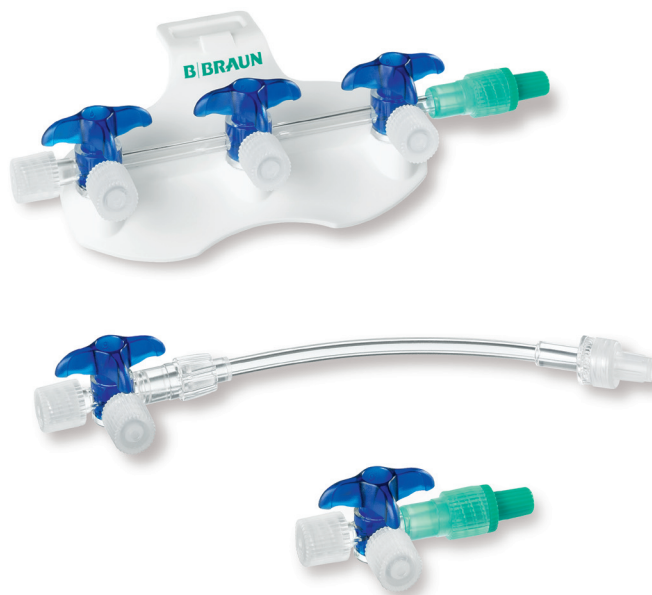

"Discifix® C fjerner usikkerheten i våre daglige rutiner."


Utformet for din sikkerhet

Discofix® C – enkel håndtering, unik sikkerhet

Enten kranen koples til en IV-kanyle eller CVK, eller integreres i et infusjonssystem, er det viktig at alle koblinger og justeringer kan gjøres raskt og enkelt. Du må kunne stole på en sikker, lek-kasjefri kobling under bruk.

Alle disse aspektene er det tatt hensyn til under utformingen av Discofix® C.

Nye sikkerhetsegenskaper

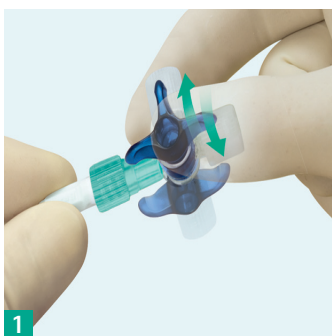

Enkel tilkobling

Rask og enkel tilkobling med den roterende adapteren garanterer et sikkert system. Tilkoplet kan Discofix® C fremdeles rotere rundt sin egen akse. Denne unike egenskapen gjør det enkelt under injeksjoner og aspirasjoner, fordi du kan vende tilgangen mot deg når sprøyte, IV-slange e.l. skal koples på. Utsiktet frakobling unngås.



Sikker og enklere tilgang

Tilkoplet til IV-kanyle, CVK eller annen IV-slange, gjør den roterende adapteren på Discofix® C med forlengelses-slange det mulig å vende tilgangen mot deg. Det muliggjør en sikker og enklere påpåkobling uten å vri slangen.



Du føler den korrekte posisjonen

Ved hver 45° vridning av kranen, føles et lite klikk. Den følbare responsen gjør at du vet at posisjonen er korrekt. Nøyaktige justeringer gjøres raskt og enkelt.

"Sikkerhet som kjennes helt ut i fingertuppene!"



Forlang kranen som aldri sprekker

Discofix® C motstår risikofylte påvirkninger fra medikamenter og påkjenninger under bruk

Uavhengig av type medikamenter som brukes og til tross for hyppige håndtering, opprettholder denne unike konstruksjonen lekkasjefrie koblinger.





Discofix® C eliminerer risikoen for plutselige sprekkdannelser og farene de kan forårsake, som kontaminering og luftemboli.

Discofix® C – testsammenligning med andre kraner

De fremragende egenskapene til denne nye generasjonen kraner har blitt testet av uavhengige institutter og bekreftet av helsepersonell.

Alle studier viste at de mest potente medikamentene ikke påvirket Discofix® C, selv under lang tids bruk.

*"Løsningsmiddelet i phenytoin infusjonskonsentrat kan meget raskt angripe kraner laget av plast (for eksempel polycarbonat)."**

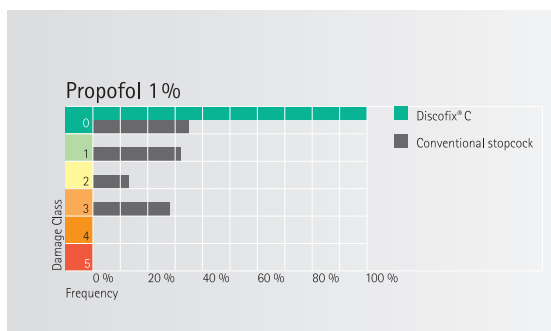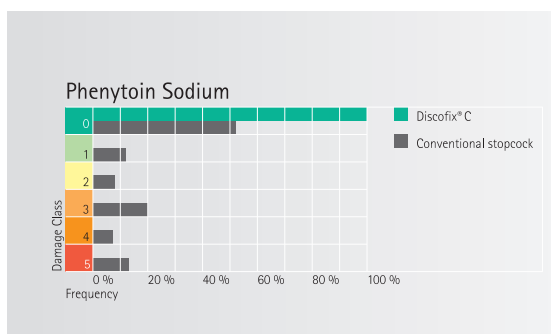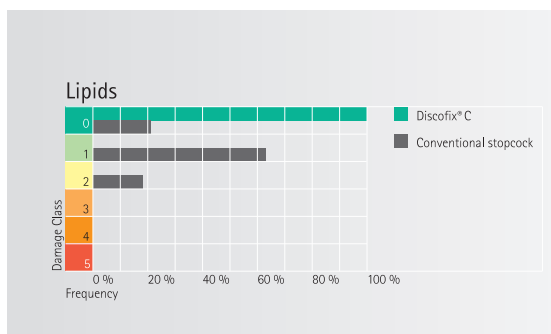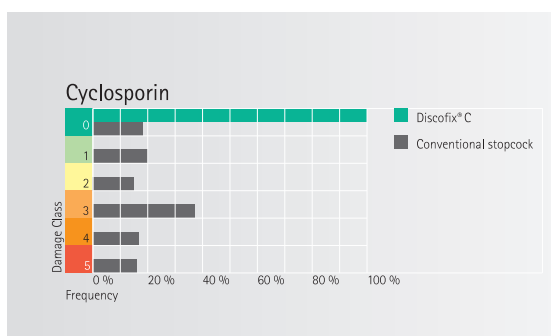


Risikoklasser:

Klasse 0:
Ingen skade




Klasse 1:
Liten rift

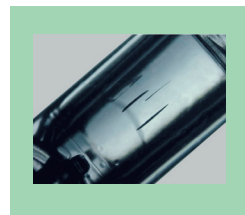


Klasse 2:
Mange rifter




Klasse 3:
Interne
sprekker

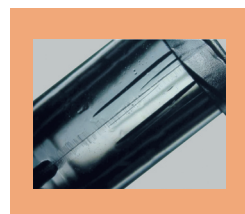

Klasse 4:
Gjennomgående
sprekker

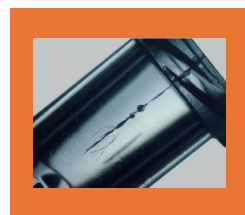

Klasse 5:
Katastrofale
sprekker

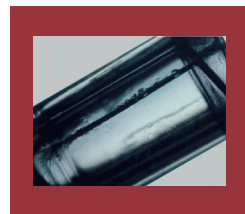

*Bruksanvisning

Stol på Discofix® C

Den nye generasjonen kraner møter utfordringene


Discofix® C kombinerer et revolusjonerende materiale med mer enn 20 års erfaring. Kranens utmerkede egenskaper gjør den enkel å bruke og resistent mot sprekke-dannelser grunnet spenninger. Risikoen og den kontinuerlige overvåkingen som en gang var assosiert med konvensjonelle kraner, er nå eliminert fra sykehusrutinen. Med Discofix® C, har utviklingen nådd et høyt nivå av sikkerhet og anvendelighet.

Sikkerhetsegenskaper

- Roterende adapter gir enkel tilgang ved injeksjon og aspirasjon
- Følbar respons ved hver 45° vridning gir sikker innstilling
- Sprekkresistent mot medikamenter
- Opprettholder en lekkasjefri kobling, selv ved lang tids bruk
- Hindrer lekkasje, kontaminering og luftemboli




Discofix® C – velg den beste

Produkttype	Versjon			Salgsenhet/stk	Art. nr.
	C-3	blå	Enkeltpakket, steril	100	16494C
	C-3	hvit	Enkeltpakket, steril	100	16495C
	C-3	rød	Enkeltpakket, steril	100	16496C
	C-3	gul	Enkeltpakket, steril	100	16497C
	C-3	blå	Enkeltpakket steril m/forlengesslange 10cm	50	16500C
	C-3	blå	Enkeltpakket steril m/forlengesslange 25cm	50	16520C
	C-3	blå	Enkeltpakket steril m/forlengesslange 50cm	50	16540C
	C-3	blå	Enkeltpakket steril m/forlengesslange 75cm	50	16551C
	C-3	blå	Enkeltpakket steril m/forlengesslange 100cm	50	16560C
	C-3	hvit	Enkeltpakket steril m/forlengesslange 10cm	50	16501C
	C-3 Kranbro	b/g/r *	Enkeltpakket, steril	50	16600C
	C-3 Kranbro	blå	Enkeltpakket, steril	50	16605C
	C-3 Kranbro	blå	Enkeltpakket steril m/forlengesslange 150cm og proximal blå stoppekran	50	16610C
C-3 Kranbro	blå	Enkeltpakket steril m/forlengesslange 150cm	50	16615C	
Industrikunder				Salgsenhet/stk	Art. nr.
C-3	blå	Bulk, usteril	på forespørsel	16016C	
C-3	rød	Bulk, usteril	på forespørsel	16017C	
C-3	hvit	Bulk, usteril	på forespørsel	16018C	
C-3 Kranbro	b/g/r *	Bulk, usteril	på forespørsel	16620C	
C-3 Kranbro	blå	Bulk, usteril	på forespørsel	16625C	
* blå/gul/rød					


Discofix® C

Anbefalinger for bruk av den sprekkesistente 3-veiskranen


For å få fullt utbytte av fordelene til Discofix® C med roterende adapter og klikkfunksjon ved hver 45° vridning, husk følgende:

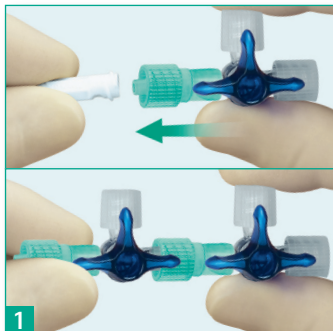

Koble til Discofix® C.

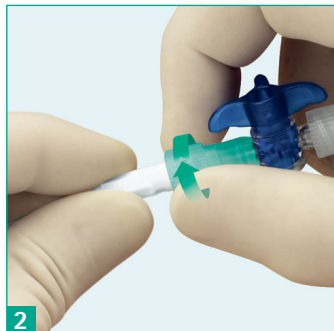


Skru godt til

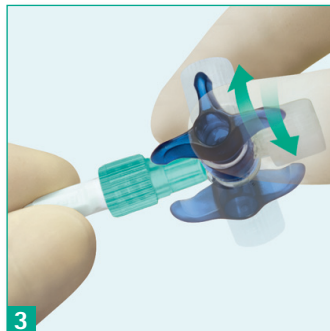

Tilkoblet kran roterer 360° rundt egen akse. Kranens posisjon kan enkelt justeres uten risiko for utilsiktet frakobling.



Roterende adapter gir enkel tilgang ved injeksjon og aspirasjon.

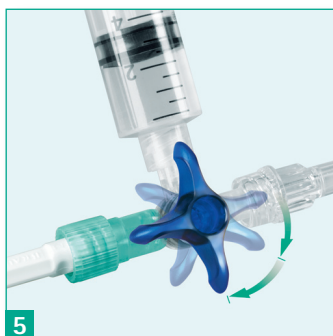

Et følbart klikk ved hver 45° vridning sikrer nøyaktig og enkel justering av 3-veiskranen.

Discofix® C

Den roterende adapteren på Discofix® C og klikkfunksjonen ved 45° vridning er en stor fordel, spesielt på mobile pasienter.

- Den roterende adapteren minsker risikoen for utilsiktet frakobling ved pasientbevegelser
- Det følbare klikket ved hver 45° vridning bekrefter nøyaktig innstilling ved justering, og øker sikkerheten ved bruk av 3-veiskranen



